

Gelio naudojimo instrukcija

Activ'M Gel® yra silikoninis gelis su matiniu efektu, pagamintas iš naujos kartos medicininės klasės silikonų. Šie komponentai yra parenkti pagal jų biologinį suderinamumą.

Activ'M Gel® yra naudojamas hipertrofiniams ir keloidiniams randams gydyti bei estetiniam patobulinimui : jis akivaizdžiai sumažina jūsų randus, nesvarbu, ar jie buvo nesenai, ar seni.

Activ'M Gel® teigiamas poveikis:

- Prevencija
- Gydymas

Activ'M Gel® daugiausia naudojamas ant veido ir lenkimo zonose bei sąnariuose, kur silikoninį tvarstį užtepti nelengva. Užtepus Activ'M Gel® ant odos susidaro tik apsauginė ir nematoma plėvelė.

NAUDOJIMAS

Silikono gelio Activ'M Gel® esminiai pranašumai pagerina senų ir naujų randų išvaizdą.

- Jie gydo hipertrofinius ar keloidinius senus ar naujus randus
- Jie neleidžia uždaroms žaizdoms tapti keloidiniais arba hipertrofiniais randais (po operacijos ar nudegimų).
- Activ'M Gel® galima naudoti ant vaikų randų.

KONTRAINDIKACIJOS

Activ'M Gel® negalima naudoti esant:

- Atviroms žaizdoms (po operacijos ar nudegimų),
- Maceravimui,
- Gleivinei ir arti akių,
- Neįkvėpkite ir nenurykite Activ'M Gel®.

Atsiradus odos reakcijai, gydymą nutraukite ir kreipkitės į gydytoją.

ŠALUTINIAI EFEKTAI

Nėra žinomo šalutinio poveikio.

INSTRUKCIJOS

- Prieš naudojimą kruopščiai nuvalykite ir nusausinkite randą (naudodami neutralų muilą).
- Užtepkite nedidelį Activ'M Gel® kiekį tiesiai ant rando vietos. Leiskite išdžiūti kelias sekundes.
- Activ'M Gel® reikia tepti du kartus per dieną – ryte ir po pietų.
- Po naudojimo atsargiai uždėkite viršutinę dalį ant tūbelės.

Gydymą rekomenduojama tęsti mažiausiai 2–4 mėnesius. Gydymas gali būti pratęstas iki 1 metų. Dėl trinties galima nuimti dalį silikoninės apsauginės plėvelės. Tol, kol nedidelis silikoninės plėvelės kiekis lieka ant odos, palikdamas ant odos šilkinį pojūtį.