

Instruções de Uso do Gel

Activ'M Gel® é um gel de silicone com efeito malte, composto por uma nova geração de silicones, seleccionados especialmente pela sua elevada biocompatibilidade.

O Activ'M Gel® é indicado para o tratamento de cicatrizes hipertólicas ou colóides, assim como para o tratamento estético de cicatrizes recentes ou antigas, pois reduz a sua visibilidade. O Activ'M Gel® possui os seguintes efeitos benéficos:

- Previne
- Cura

O Activ'M Gel® é usado sobretudo na face, pregas e articulações, onde a utilização de uma placa de silicone não é uma solução eficaz por ser de difícil colocação. Após aplicado, o Activ'M Gel® forma uma camada protetora e invisível sobre a pele.

UTILIZACAO

As vantagens intrínsecas da utilização de um gel de silicone refletem-se na melhoria do aspeto das cicatrizes, sejam estas recentes ou mais antigas:

- No tratamento de cicatrizes hipertólicas ou colóides, recentes ou antigas;
- Prevenindo que feridas fechadas evoluam para colóides ou cicatrizes hipertólicas (por exemplo, após cirurgia ou queimadura):
- O Activ'M Gel® está também indicado para o tratamento de cicatrizes em crianças.

CONTRA-INDICAÇÕES

O Activ'M Gel® não deve ser utilizado em nenhuma das seguintes situações :

- Ferida aberta;
- Maceração;
- Queimadura;
- Mucosa;
- Não Inale Activ'M Gel®.

No caso de reacção cutânea, suspenda o tratamento e consulte o seu médico.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Não são conhecidos quaisquer efeitos secundários até à Data.

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de aplicar, lave e seque cuidadosamente a cicatriz a tratar.
- Aplique uma pequena quantidade de Activ'M Gel® directamente na área da cicatriz. Deixe secar por alguns segundos.
- Deve aplicar Activ'M Gel® 2 vezes por dia.
- Tape a embalagem após cada aplicação.

Recomenda-se que o tratamento tenha uma duração média de 2 a 4 meses.

Por fricção, uma parte da película protetora de silicone pode ser removida. Enquanto uma boa quantidade da película de silicone permanece na pele, isso deixa uma sensação sedosa na pele.