

## Jel Kullanım Talimatı

Activ'M Gel® biyoyumluluklarına göre seçilmiş, tıbbi kullanıma uygun yeni nesil silikonlardan oluşan parlama karşıtı matlaştırıcı bir jeldir.

Activ'M Gel® hipertrofik skar ve keloid tedavisi ve eski ve yeni skarların görünümünün iyileştirilmesinde endikedir: skarların görünümünü azaltır. Önleyici ve iyileştirici etkileri vardır.

Activ'M Gel® özellikle yüzde ve silikon bant kullanmanın zor olduğu, bükülen vücut kısımlarında ve eklemlerde kullanımı idealdir ve kolaydır.. İpeksi yapısı sayesinde, uygulandıktan sonra cilt üzerinde ince ve şeffaf bir koruyucu katman oluşturur.

### ENDİKASYONLARI

Activ'M Gel® silikon jelin özgün içerikleri, skarların görünümünde iyileştirme sağlar:

- Eski ve yeni hipertrofik skarların ve keloidlerin tedavisinde
  - Cerrahi operasyon ya da yanık sonrası kapalı sargılarda, önleyici tedbir Activ'M Gel® silikon jel çocuklarda kullanım için uygundur.

### KONTRENDİKASYONLARI

Activ'M Gel® aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır.

- Cerrahi operasyon ya da yanık sonrası açık yaralarda,
  - Maserasyon durumunda,
  - Yanık,
  - Mukoza üzerinde ve göz çevresinde,
  - Activ'M Gel® silikon jeli solumayın ve yutmayın solumaym.
- Cilt reaksiyonu oluşması halinde tedaviyi sonlandırın ve doktorunuza danışın.

### YAN ETKİLERİ

Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.Yan etkileri halihazırda bilinmemektedir.

### UYGULAMA ŞEKLİ

- Activ'M Gel® silikon jeli uygulamadan önce yarayı iyice temizleyin ve kurutun.
- Az miktarda Activ'M Gel® silikon jeli yaranın üzerine ince bir tabaka halinde sürün. Birkaç saniye kurmasını bekleyin.
- Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uygulayın.
- Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatın.

Tavsiye edilen tedavi süresi 2 ila 4 ay'dır. 1 yıla kadar uzayabilir.

Silikon koruyucu tabaka, sürtünme halinde soyulabilir. Bununla birlikte, yara üzerinde ince bir katmak silikon kalır ve cilt yüzeyine ipeksi bir his verir.