

Zselé használati útmutató

Az Activ'M Gel® új generációs orvosi fokozatú szilikonból készült, matt hatású gél. A komponensek biokompatibilitási szempontból válogatott anyagok.

Az Activ'M Gel® szilikongél használata javallott a hipertrófiás és keloidos hegek esetében, továbbá a régi és új hegek esetében, mivel esztétikailag észrevehetően csökkenti azok külső megjelenését.

Az Activ'M Gel® előnyös hatást fejt ki:

- megelőzésre és
- gyógyításra

Az Activ'M Gel® ideális és egyszerűen használható. Fő alkalmazási területe az arc és olyan testfelületek, pl. az ízületek területe, ahol a bőr hajlása miatt szilikontapasz alkalmazása nem lehetséges. Használat után az Activ'M Gel® a bőrön láthatatlan, selymes érintésű védőfilmréteget képez.

JAVALLATOK

Az Activ'M Gel® szilikongél eredendő tulajdonságai előnyösen befolyásolják a hegek megjelenését:

- elősegíti régi és új hipertrófiás és keloidos hegek gyógyulását,
- megelőzi keloid és hipertrófiás heg kialakulását a zárt sebeken műtéti és égési hegek esetében.

Az Activ'M Gel® gyermekkorban is alkalmazható.

ELLENJAVALLATOK

Az Activ'M Gel® nem alkalmazható a következő esetekben:

- sebészeti beavatkozás vagy égés utáni nyílt seben,
- felázott bőrterületen,
- nyálkahártya seb és a szem közelében.
- Kerüljük az Activ'M Gel® belégzését vagy lenyelését. Bőrreakció esetén függesse fel a kezelést, és kérdezze kezelőorvosát vagy szakorvosát.

MELLÉKHATÁSOK

Semmilyen mellékhatás nem ismeretes.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Használat előtt tisztítsa meg (semleges szappannal) és szárítsa meg alaposan a heget.
- Kevés mennyiségű Activ'M Gel®-t vigyen fel a heges területre. Néhány másodpercig hagyja száradni. Masszázs kerülendő.
- Az Activ'M Gel®-t naponta kétszer, reggel és este használja a leírt módon.
- A tubus zárókupakját gondosan helyezze vissza.

A kezelést 2-4 hónapig javasolt folytatni. A kezelés egy évig folytatható.

A szilikon védőréteg dörzsöléssel részben eltávolítható, de egy vékony szilikonfilm megmarad a hegen, és a bőrön selymes tapintat érezhető.