

## 凝膠使用說明

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

本品為具霧面療效之疤痕護理矽膠凝膠，由新一代矽膠所組成；這些成份具有良好生物相容性。

本品適用於炎症疤痕、肥厚性和蟹足腫，與增加新舊疤痕的美觀，和減少明顯的疤痕。

本品的優點為：

- 可預防。
- 可治療。

本品主要適用在臉部、彎曲區域部位、關節，以及矽膠片不易貼敷的部位。塗敷本品後，在皮膚上會形成一層具有防護效用但無形的薄膜。

適應症：

限醫療器材分類分級管理辦法「疤痕處理矽膠產品(I.4025)」第一等級鑑別範圍。

矽膠凝膠的實質優點為改善新、舊疤痕的美觀：

- 治療肥厚性、蟹足腫等新、舊疤痕。
- 預防閉合性傷口變成蟹足腫或肥厚性疤痕(因外科手術後或燒燙傷所導致的傷害)。
- 適用於孩童的傷口疤痕。

禁忌：

下述情況，不可使用本品：

- 開放性傷口。
- 浸潤性組織。
- 燒燙傷。
- 黏膜。
- 不可吸入本品。

若有皮膚反應，則應暫停治療，並諮詢醫師。

副作用：

迄今，副作用是未知的。

使用說明：

1. 使用前，徹底清潔並擦乾疤痕。
2. 取少量本品，直接塗抹於疤痕部位，停留數秒等它乾了。無須持續摩擦、按摩擦拭部位。
3. 本品必須每天塗二次。
4. 小心地將管蓋蓋回軟管。

建議持續使用 2 至 4 個月。

藉由摩擦，部分的矽膠防護膜會被除去；只要在皮膚上留有細微量的矽膠防護膜，就可讓皮膚有一種柔滑的感覺。